



C €1011

# HEMOALUSTAT

**PŁYN HEMOSTATYCZNY**  
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

**Skład :**

25% Chlorek glinu, woda.

**Zastosowanie :**

Preparat do tamowania drobnych krwawień w obrębie śluzówki jamy ustnej, działający obkurczająco i hemostatycznie. Można stosować również razem z nitkami retrakcyjnymi oraz przy krwawieniu podczas ekstyrpacji miazgi kanałowej zęba.

**Sposób użycia :**

Po aplikacji na jałową watkę lub mikro-gąbkę wcierać delikatnie w krwawiące miejsce od kilku do kilkunastu sekund. W razie potrzeby można nasączać płynem nitkę retrakcyjną lub wprowadzać do kanału na sączku. Następnie delikatnie spłukać wodą destylowaną lub roztworem soli fizjologicznej – w razie konieczności czynność powtórzyć.

**Środki ostrożności:**

Ze względu na drażniące działanie unikać kontaktu preparatu z oczami, śluzówką jamy ustnej i skórą. Miejsca przypadkowego kontaktu zaleca się przepłukać dużą ilością wody. W przypadku spożycia nie powodować wymiotów, pić dużo wody i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Stosować koferdam, rękawiczki, okulary oraz odzież ochronną podczas pracy z preparatem.

**Przeciwwskazania :**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na składniki preparatu.

**Przechowywanie :**

Przechowywać w temperaturze pokojowej - nie przekraczać 25 stopni C.

Nie przekraczać daty przydatności do użytku podanej na opakowaniu. Po każdym użyciu szczelnie zamykać opakowanie.

**Postępowanie z opakowaniami :**

Zużyte opakowania utylizować lub zwrócić producentowi.

**Zawartość :**

Buteleczka PE 10 ml z aplikatorem.

**Termin ważności :**

2 lata od daty produkcji.

PREPARAT DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W STOMATOLOGII.

FIRMA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA PREPARATU  
NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI 06.01.2014



**Chemi Dental**

Laboratorium Chemii Stomatologicznej  
95-200 PABIANICE, Ul. Orla 10-12/3

TEL./FAX 42-213-06-37 KOM. 510 218 910

[WWW.CHEMIDENTAL.PL](http://WWW.CHEMIDENTAL.PL)

